

FERNO
HEAD IMMOBILIZER

モデル445-S

ヘッドイモビライザー

ベースプレート分割式



021414006 ヘッドサポートパッド付き

021414007 ヘッドサポートパッド無し

■ ヘッドサポートパッドは、モデル445と共通です。



ベースプレートに取り付けたまま
収納することができます



装着時

■ 安全の為、傷病者の頭頸部を固定する際は
頚椎固定具を併用して下さい。

スクープエクセルとスクープストレッチャーでの頭部固定に適しています

Feature/特徴

- ベースプレートが分割式なのでスクープタイプの
ストレッチャーに対応しています。
- 装着、着脱も容易です。
- 傷病者の頭部を高い固定力で保持しながら安全に
搬送することができます。
- 中性洗剤やぬるま湯等で洗浄できます。

Material/材質

ベースプレート / ヘッド&チンパッド
表皮：ターポリン 芯材：発泡ポリエチレンフォーム
ヘッド&チンストラップ
ポリプロピレン

製造販売届出番号

13B1X00226000029 (一般医療機器 クラスI)

仕様は改良のため、予告なしに変更される事があります。

How to use/使用方法



1 頚椎を中立位にします



3 ヘッド&チンストラップを取り付けます



2 ヘッドサポートパッドを取り付けます



4 各ストラップの長さを調節して固定します

輸入元

FERNO
Japan

ファーノ・ジャパン・インク日本支社
〒101-0032
東京都千代田区若本町1-9-8 第3F Kビル 3F
TEL 03 (5820) 4649 FAX 03 (5820) 4669
URL <http://www.ferno-jp.com>

販売代理店