

**FERNO**


# FERNO XT

ファーノ XT



脊椎固定用に設計された  
革新的なボード

自動車や挟所等に関じ込められた傷病者を素早く救出する事ができます

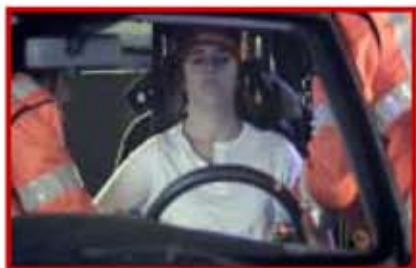

- 繊維強化プラスチックボードは滑りやすいので、傷病者の背面への差込が容易です。
- QHIとヘッド&チンストラップで頭部を固定する事ができます。
- 4本の固定ベルトは色分けされており、間違った装着を防ぎます。
- 4本のキャリングハンドルを使用して、素早く要救助者を引出す事ができます。
- 軽量で堅牢な繊維強化プラスチックボードは、X線透過に優れています。

## 仕様

長さ	幅	厚さ	重量	最大荷重	ハンドル部	最大荷重
830mm	300mm	6mm	2kg	160kg	40kg	



① 頸椎損傷が疑われるとき、頸椎固定具を使用します。



② 傷病者の背面と座席の間にボードを差し込みます。



③ QHIを使用して頭部を固定します。



④ 足部固定ベルトを大腿部に通して装着します。



⑤ 胸部固定ベルトを交差させて装着します。



⑥ 胸部固定ベルトに縫い付けてあるキャリングハンドルを掴みます。



⑦ 傷病者の身体を少し浮かせながら出口側に方向転換します。



⑧ ボードを滑らせて出口側に引き出します。



⑨ 下側のキャリングハンドルも掴んで救出します。



### 構成品

- 繊維強化プラスチックボード
- クイックヘッドイモビライザー (QHI)
- ヘッド&チンストラップ 2本
- 固定用ベルト 4本
- キャリングハンドル (赤) 4本
- 収納ケース

仕様は改良のため、予告なしに変更される事があります。

■ 安全の為、要救助者の頭頸部を固定する際は、頸椎固定具を併用して下さい。

輸入元



ファーノ・ジャパン・インク日本支社  
 〒101-0032  
 東京都千代田区岩本町1-9-5 F Kビル 4F  
 TEL 03 (5820) 4649 FAX 03 (5820) 4669  
 URL <http://www.ferno-jp.com>

販売代理店