



Ratcheting Medical Tourniquets


RMT 止血帯

上下肢への緊縛止血を適切に制御
唯一のセルフロック式止血帯



Feature

- ◇ 唯一のセルフロック式止血帯なので締め過ぎによる神経系へのダメージを軽減。
- ◇ 使用者を選ばず1クリック毎にラチェットで緊縛の微調整が行えるので、適切に血流の制御が可能。
- ◇ ダブルリング方式を採用する事により仮止め位置より緩む心配がありません。
- ◇ コンパクトで軽量、そして女性でも操作が容易。

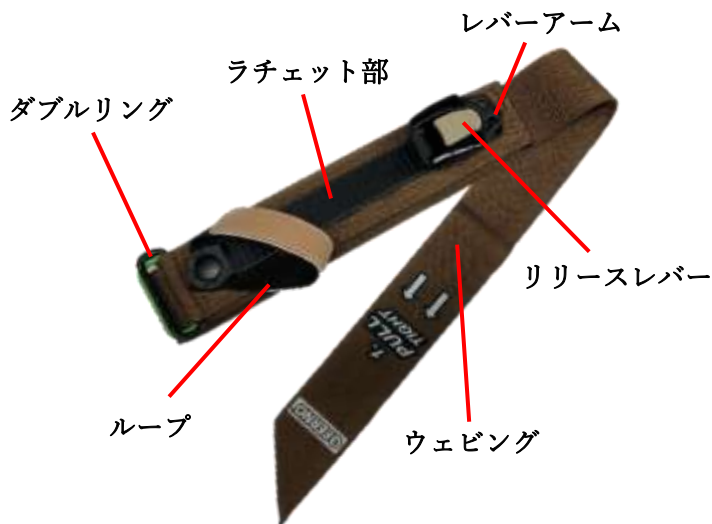

Specifications



RMT 止血帯	
全長	1030 mm
収納時	133 mm
幅	37 mm
重量	102 g

医療機器製造販売届出番号：13B1X00226000034

 **FERNO**® FOR LIFE™

How to operate of the RMT tourniquets

- ① ダブルリングにウェビングを通し、
折り返して山を作ります



- ② 緑色のリングに折り返した
ウェビングの山を通します



- ③ ウェビングとループを引いて、
止血帯を締めます



- ④ スリーフィンガーチェックを行い、
指が入らない事を確認します



- ⑤ ラチェットを引き、適切な位置まで
止血帯を締めます



- ⑥ リリースレバー又はウェビングを
引く事で簡単に取り外せます



※仕様は改良のため、予告なしに変更される事があります。

輸入元：ファーノ・ジャパン・インク日本支社
〒101-0032
東京都千代田区岩本町 1-9-5 FK ビル 4F
TEL：03(5820)4649
FAX：03(5820)4669



 **FERNO** FOR LIFE™

販売元：

NOV. 2018