

MODEL

5/5-13


# 取扱説明書

モデル 5/5-13 ファスナー

FORM F-002

DATE 01/MAR/15

FASTNER

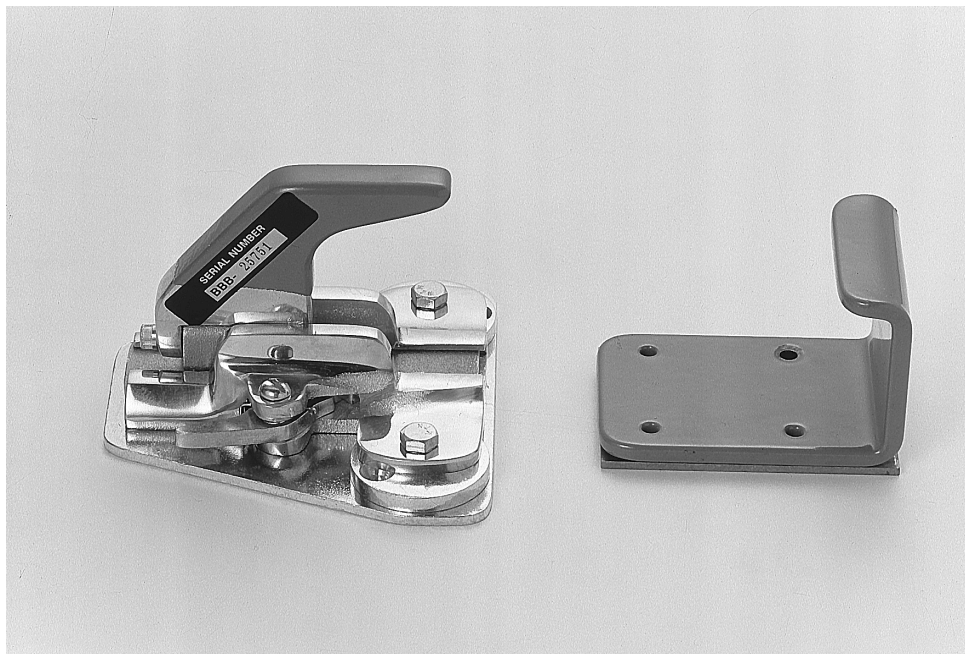

この度はファーノ・ワシントン社製ファスナー モデル5/5-13をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございました。本器をご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読み下さいますようお願い致します。

## お願い

1. この取扱説明書は、大切に保管して必要な時にはご再読下さい。
2. ご使用になる方全員に適切な講習を行って下さい。
3. 右欄は必要事項の記録用にお使い下さい。
4. 日常の点検は確実に行って下さい。
5. 使用方法に関してお分かりにならない点がありましたら、販売店または弊社までお問い合わせ下さい。

製造番号

購入日

販売店

その他


 **FERNO**<sup>®</sup>  
Japan

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

日本支社：〒101 東京都千代田区岩本町 1-9-5 FKビル 4F  
-0032 Tel：03-5820-4649(代) Fax：03-5820-4669

商品・技術：〒192 東京都八王子市下柚木 528-1  
センター -0372

## 構成品

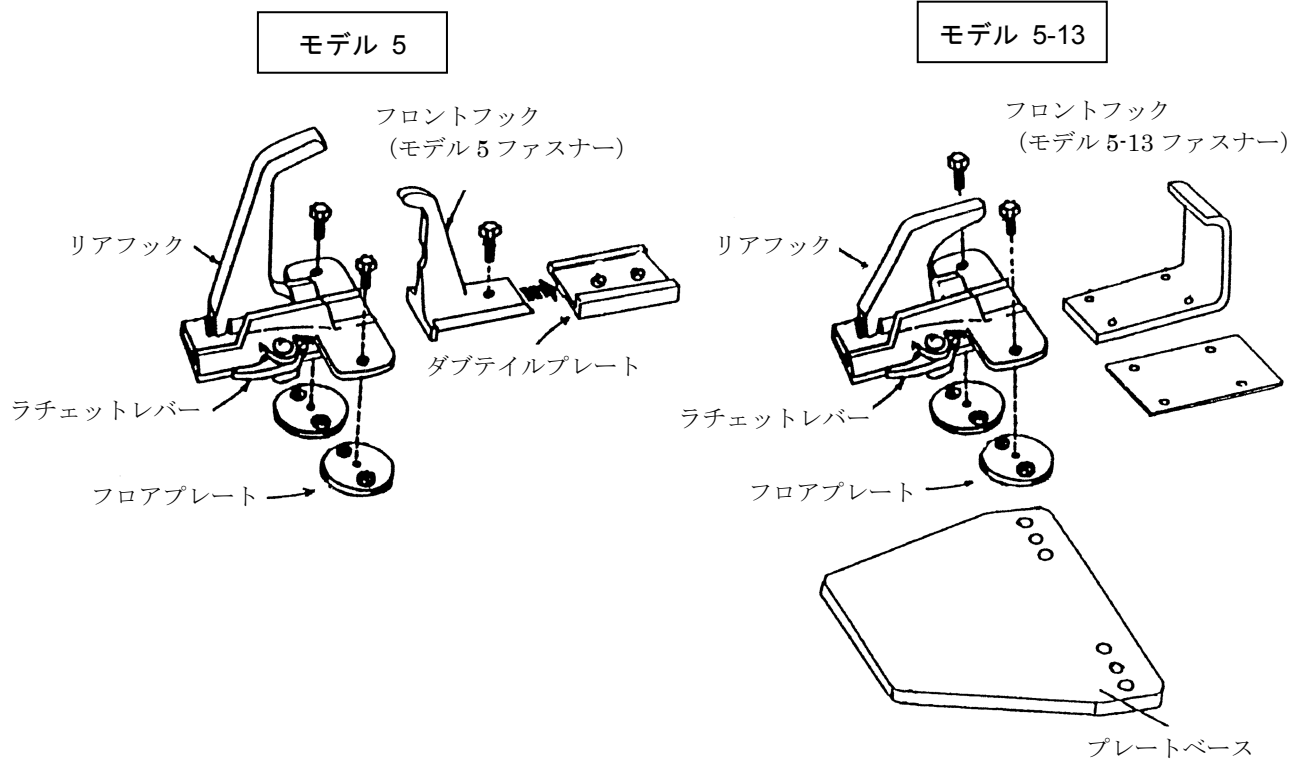

モデル 5/5-13 は、日本においては最も一般的なストレッチャー／トランスポーターの固定方法として普及しています。


車両に取り付ける際は、ストレッチャー／トランスポーターに多少の製造誤差がある為、現物に合わせて取り付けることをお勧め致します。また、車両の床に穴を開ける為、架装は専門の架装工場、または自動車ディーラーに依頼されることをお勧め致します。

## 適用モデル


- モデル 5 ファスナー      モデル 26、モデル 24-H、モデル 104、モデル 104-S4  
(但し、モデル 104 シリーズはオプションの金具が必要になります)
- モデル 5-13 ファスナー      モデル 4070、モデル 4080、モデル 24-4

ファスナーを固定する位置。(下図は一例です。)


### フロントフック部

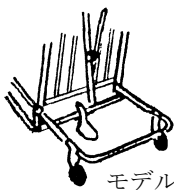

モデル 26

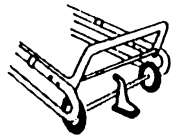

モデル 24-H

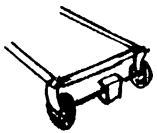


モデル 4070  
4080  
24-4




モデル 104  
104-S4


### リアフック部

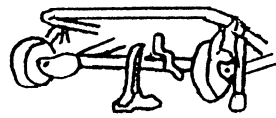

モデル 26

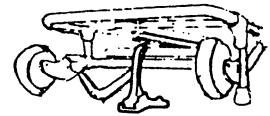


モデル 24-H

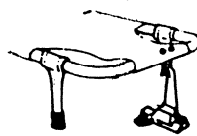


モデル 104、S  
104-S4



モデル 4070  
4080  
24-4

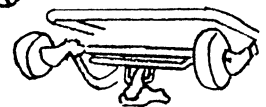


ファスナーの操作方法。

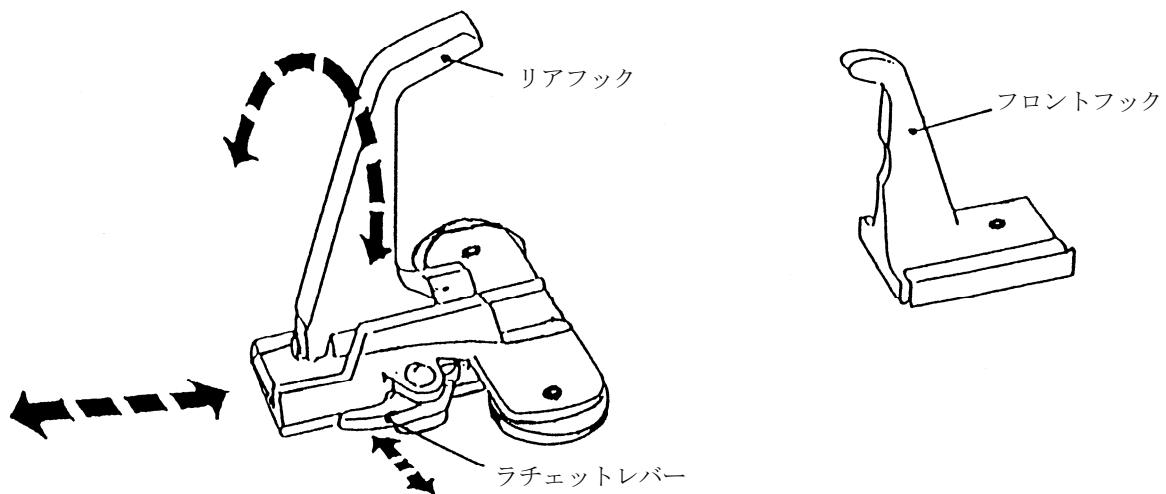

1. ストレッチャー／トランスポーターを搬入する前にファスナーのリアフックを横に倒しておきます。
2. 搬入が終了したら、そのままストレッチャー／トランスポーターのフロント部の横パイプ等がファスナーのフロントフック部に当たるまでストレッチャーを押し込みます。
3. リアフックを垂直に立て、前方に押し込みます。ラチェットレバー部の働きによりロックされていきますのでメインフレーム等に当たるまで押し込んで下さい。
4. ストレッチャー／トランスポーターを搬出する際にはラチェットレバーを押すとロックが解除されますので、リアフックを手前に引いて横に倒します。

# 交換部品リスト

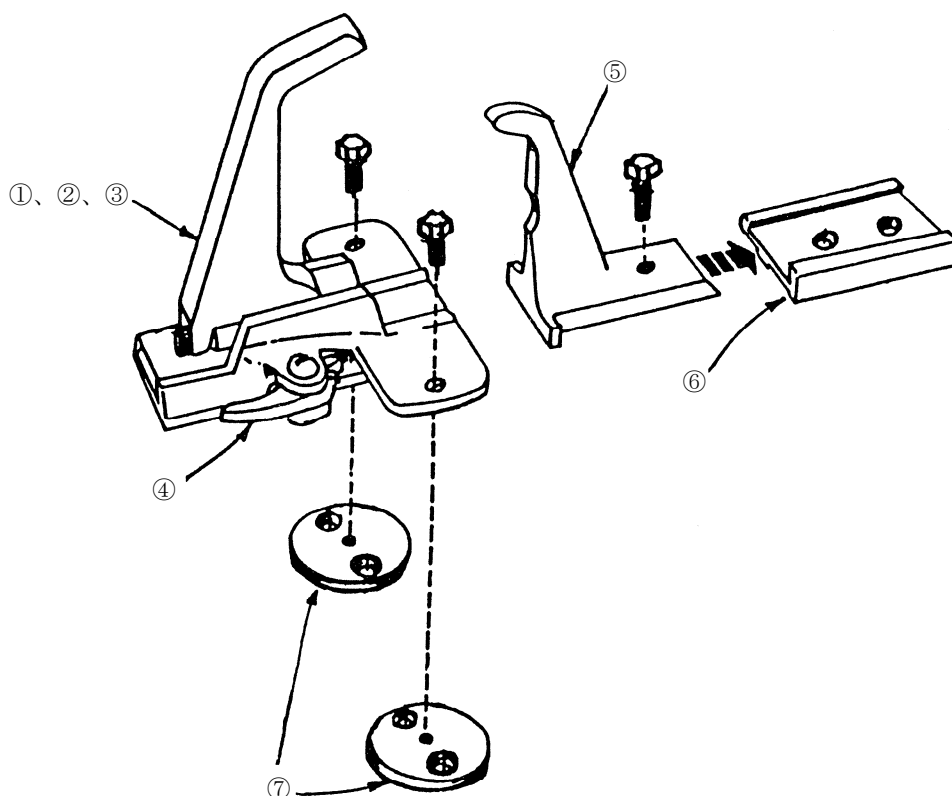

番号	品名	パーツナンバー	数量
1	リアフック (#5 用)	090-0270-00	1
2	リアフック (#5-1 用)	511-2100-00	1
3	リアフック (#5-13 用)	083-1935-00	1
4	ラチェットレバー Assy	090-0280-00	1
5	フロントフック (#5 用)	090-0300-00	1
6	ダブルテイルプレート (#5 用)	090-0310-00	1
7	フロアプレート (円型)	090-0290-00	2