


リッターシールドの取り扱いについて

1. クランプの取り付け

クランプを頭部側中央に置き、ボルト、ワッシャー、ナットをセットします。ワッシャーはクランプを挟むよう両側にセットします。


7/64インチの六角レンチとスパナ、又はモンキーレンチを使って六角穴付きボルトを締めていきます。ナットとクランプの間に隙間がなくなるまで締めてください。

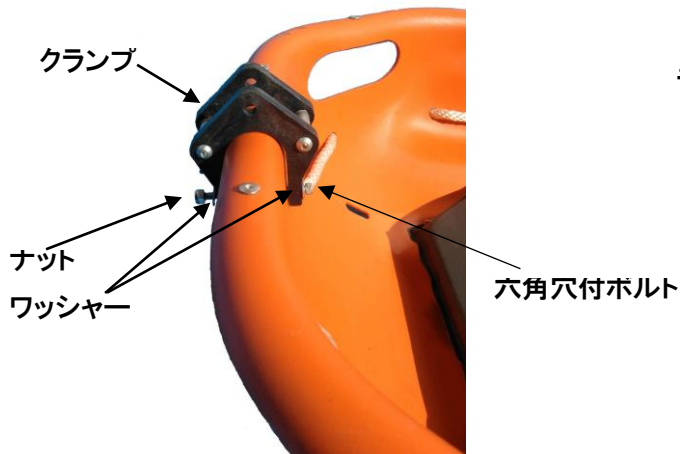

2. リッターシールドの取り付け

ピンをリッターシールドから外します。シールド部ブラケットをクランプの間に置いてピンを差し込みます。

ピンホルダーをひろげてピン先端にはめてピンが外れないようにします。

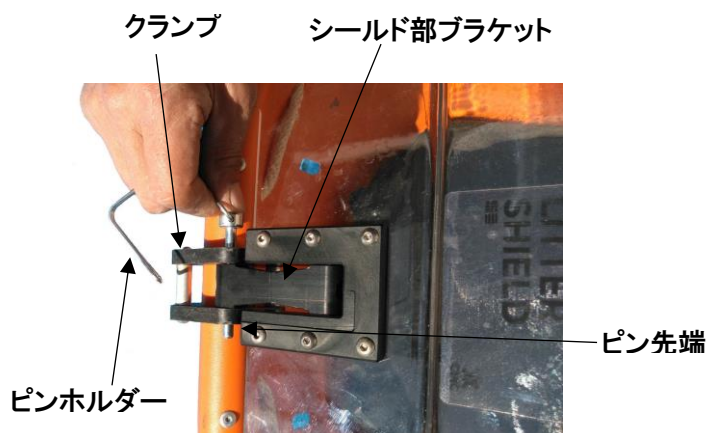

ベルトを担架の持ち手に取り付けます。

シールド部を反転した状態。



ベルト