

類別：医療用品5 副木

一般的名称：成形副木

JMDNコード：35354000

クラス分類：クラスⅠ 一般医療機器

再使用禁止

ヘッドハガー モデル455


【警告】

- 1 実際に使用する前に、取扱方法を十分に習得して下さい。
- 2 使用法を習得した人意外は使用しないで下さい。
- 3 装着する際は、傷病者の安全を確保するために、2人以上で行って下さい。

【禁忌・禁止】

- 1 本体は再使用禁止です。
- 2 本体はバックボードと併用するものです。
単体での使用はできません。

【形状・構造及び原理等】＊＊

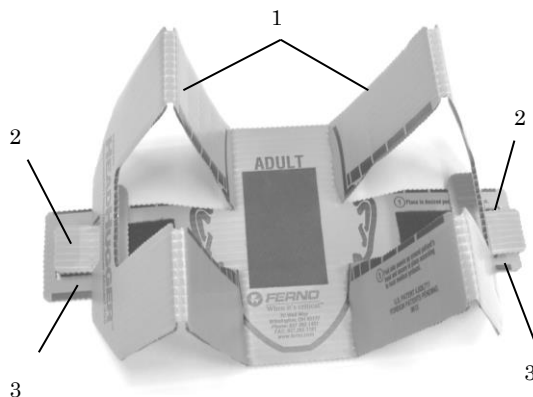

- 1 サイドサポートパネル 3 ポジショニングタブ
2 プラスチックタブ

本体をバックボードに置き、サイドサポートパネルを開いて傷病者の後頭部に置き、ポジショニングタブとプラスチックタブを調節して頭部を固定します。

【使用目的又は効果】＊

- 1 使用目的 頭部に損傷がある場合、損傷が疑われる場合に頸頭部を固定するために使用します。
- 2 効果又は効果 頭部を固定する事で、二次障害を防止します。

【品目仕様】

- 1 パッドの中央に穴があり、問診の妨げになりません。
- 2 水分、血液等が浸透しません。

【使用方法等】＊

- 1 本体のサイドサポートパネルを開き、傷病者の頭部の下にセットします。
- 2 両サイドのプラスチックタブを引き、本体をバックボードに固定します。

- 3 サイドサポートパネルを折り、ポジショニングタブを使用し、傷病者に合わせて固定します。もう1人の介助者は、固定が完了するまで、傷病者の頭部を押さえて下さい。
- 4 両側のサイドサポートパネルと傷病者の額、顎部をテープで固定します。更にテープを利用して、その上からバックボードに巻き付け固定します。頸椎カラーを併用している場合は、カラーの上から固定して下さい。

【使用上の注意】

- 1 使用方法を習得した人意外は使用しないで下さい。
- 2 装着は2人以上で行って下さい。
- 3 本体を装着する時は、傷病者の状態を絶えず確認して下さい。
- 4 装着中は、本体に異常が無い事を絶えず確認して下さい。
- 5 傷病者又は本体に異常が発見された時は、傷病者の安全を確保しながら適切な措置を講じて下さい。
- 6 本体は改造又は分解しないで下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1 開封前は常温で保管して下さい。
- 2 開封前は化学薬品の保管場所、ガスを発生する場所には保管しないで下さい。
- 3 本体は再使用禁止です。

【取扱上の注意】

- 1 使用後は適切な方法で廃棄して下さい。

【包装】

1セット10枚単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

- 1 製造販売業者 ファーノ・ジャパン・インク
東京都千代田区岩本町1-9-5
FKビル 4階
Tel: 03-5820-4649
- 2 製造業者 Ferno Washington Inc.
ファーノ ワシントン社
アメリカ合衆国 オハイオ州

取扱説明書を必ず参照下さい。