

スクープ エキスパンダーキット



1. お問い合わせ先

ファーノ・ジャパン・インク

〒101-0032

東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル4F

TEL 03-5820-4649

Email emsinfo.jp@ferno.com

<https://www.ferno-jp.com>

2. 製造者

Ferno S.R.L., Via Benedetto Zallone 26

40066 - Pieve di Cento (BO) - ITALY

3. 取扱条件

- 本器を操作する前には、必ず本書をお読み下さい。
- 使用前に使用方法について、トレーニングを実施してください。
- 本器は体格の大きい傷病者の搬送時のみ使用してください。
- 使用中は、本器に異常のない事を絶えず確認してください。
- 本器は、ファーノ製スクープストレッチャー モデル65EXLにのみ適合しています。それ以外の製品との併用は、絶対に行わないで下さい。
- 本器は、ファーノ製スクープストレッチャー モデル65EXLの頭部側、足部側のいずれにも取り付けることができます。
- 本器を2つ以上接続した状態でスクープストレッチャー モデル65EXLに取り付けしないで下さい。

4. カスタマーサービス

- 本書をお読みになり、ご不明な点がございましたら販売代理店または弊社までお問い合わせ下さい。

5. 保証

弊社規定により、ご購入日より1年間の保証を致します。

6. 免責事項

保証期間経過後の製品の交換は、保証の対象外となります。

以下に該当する場合は、保証期間内であっても、保証の対象外となります。また、以下の要因により発生した事故への賠償責任は、当社は負わないものとします。

- 取扱説明書に記載された方法とは異なる方法で使用した。
- 取扱説明書に記載された注意事項、警告を守らなかった。
- 不正な改造およびメーカーが承認していないオプション品を併用した。
- 医学的に証明されていない使用方法で本器を用いた。

7. 仕様

商品コード	0302310031
名称	スクープ エクスパンダーキット
構成品	本体(2個)、収納ケース
耐荷重	227 Kg

注意

- 最大荷重を越えての使用は、本器を破損させるばかりでなく、事故の原因となりますので絶対にお止め下さい。
- 仕様は改良の為、予告なしに変更される事があります。

本書をお読み頂き、参照用として大切に保管して下さい。




8 使用方法

スクープストレッチャーへの取り付け

(1) スクープストレッチャーのツインロック部の解除レバーを押して、左右に分離します。



(2) スクープエキスパンダーおよびスクープストレッチャーのロック解除レバーを押して、取り付けます。

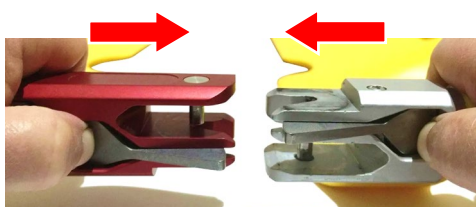


(3) 反対側も同様に取り付けます。



スクープストレッチャーからの取り外し

スクープエキスパンダーおよびスクープストレッチャーのロック解除レバーを押して、外側に引いて分離します。

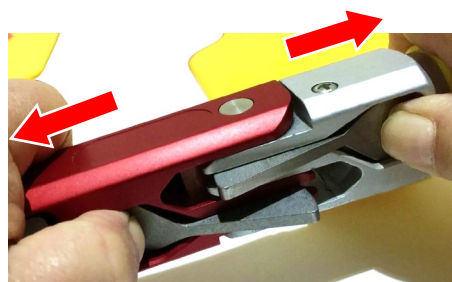

9. 洗浄・消毒

洗浄

- 中性洗浄剤の溶液で洗浄して下さい。
- 流水で濯ぎ、洗浄剤を完全に除去して下さい。
- 完全に乾燥させて下さい。

消毒

- 消毒剤の取扱説明書に従い、清拭して下さい。

注意

- 漂白剤、フェノール類およびヨウ素を含有する洗浄剤および消毒剤は、本器が損傷する可能性がありますので、絶対に使用しないで下さい。

10. 点検

以下の点検を毎使用時に実施し、異常が発見された場合は、絶対に使用しないで下さい。

- ひび割れ、破損がないこと。
- スクープストレッチャーに確実に取り付けができること。

製造販売元 ファーノ・ジャパン・インク

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル4F

TEL03-5820-4649 FAX03-5820-4669

www.ferno-jp.com

仕様は改良の為、予告なしに変更される事があります。

2026年1月改訂