

アウトースキッド 取付方法

使用上の注意

本器を尖った岩やガラス破片などの鋭利なモノの上で引きずることは避けて下さい。


仕様

寸法 : 1,970 × 775 × 1.5mm


重量 : 1.8 kg

材質 : 高密度ポリエチレン樹脂製


付属品 : ウエビング 90 cm × 2 本

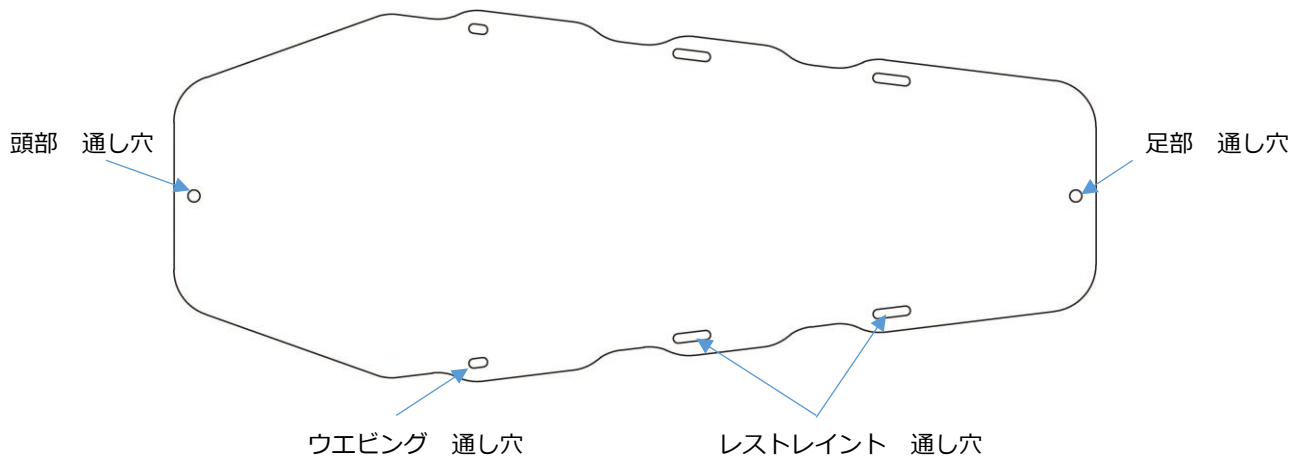

垂直吊り用 ループ (Vertical suspension loop)
キャリング ハンドル (Carrying handle)
3 番目 (No. 3)
5 番目 (No. 5)

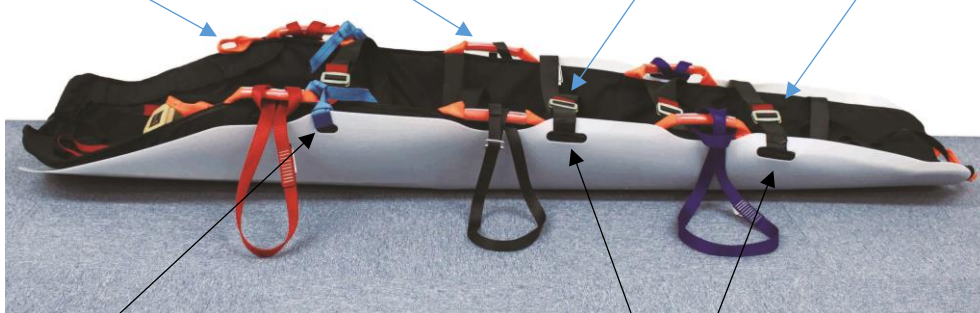

本器とバーディカル ストレッチャーをウエビングで結び固定します。締めすぎに注意して下さい。

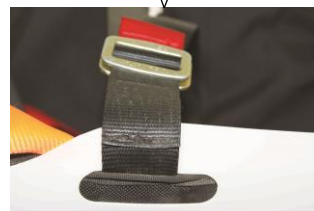

バックルを解除後、3, 5番目のレストレイントを通し穴に差し込みます。オス、メスのバックルを引き出し、接続します。

通し穴 使用方法



ひばり結び

頭部側



足部側

ストレッチャーを引きずる場合、両端が低いので少しの突起や障害物によって「ひっかかり」が発生しやすくなります。ストレッチャーの先端を曲げることによって、これを回避することができます。

両端を同時に曲げる必要はありません。引きずる方向側だけを曲げて下さい。長さ2mほどのウエビングや細いロープが必要です。

ストレッチャー先端を曲げる方法

1. ウエビングや細いロープを通し穴に通して中央部を固定します。
2. 頭部側を垂直吊り用ループ(オレンジ)、足部側はキャリングハンドルの左右に取り付けます。
3. 通した端末を引くと、ストレッチャーが曲がるので適度な角度のところで左右とも固定します。
4. 足部側の場合、一番下側のレストレイントを一旦ゆるめてストレッチャーを曲げ、再び締めて下さい。

輸入元：



ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

〒101-0032

東京都千代田区岩本町 1-9-5 FKビル 4F

TEL:03-5820-4649

FAX:03-5820-4669

販売店：