

SAM[®]

ペルビックスリング II




 **FERNO[®]**

取扱説明書


本書をお読み頂き、参照用として
大切に保管してください。




使用方法

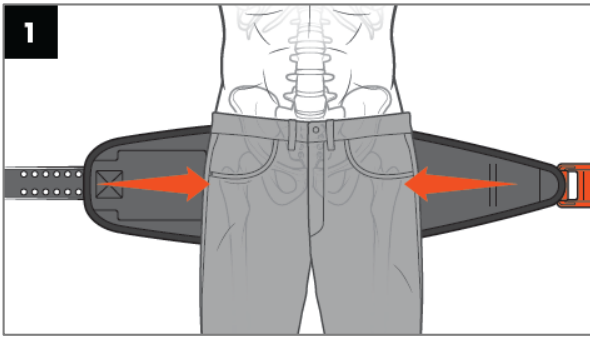

1
患者のポケット内や骨盤の周りがある物を取り除きます。本製品の黒い面を上にて、大腿骨の側面の大転子の隆起に本製品を設置します。

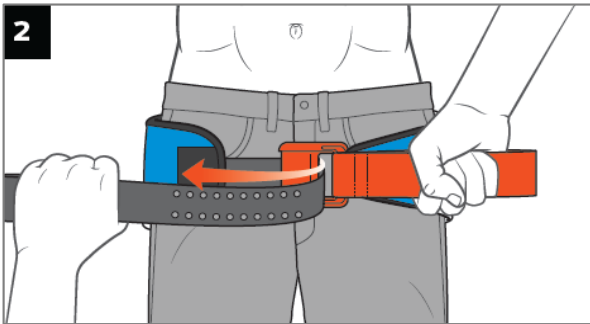

2
黒いストラップをバックルに通します。

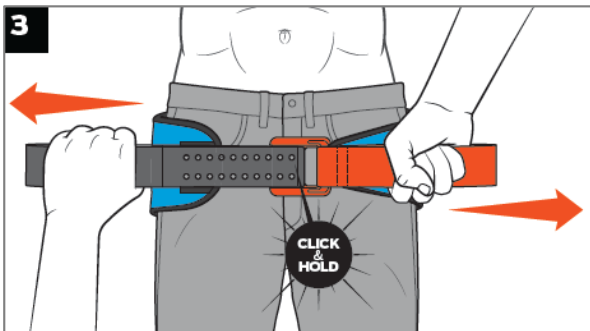

3
オレンジのストラップと黒いストラップをカチッと音がするまで反対方向に引きます。
テンションを維持し、すぐに黒いストラップをベルクロ表面に押し付けて固定します。外すときは、黒いストラップを上方向へ持ち上げ、テンションを維持したまま、ゆっくりと緩めます。

使用目的

骨盤骨折の患者を医療機関へ搬送する際、非侵襲的に骨盤を固定するベルトです。

適応

医療従事者またはトレーニングを受講した方が使用してください。

禁忌

患者に解剖学的な指標がない場合は、使用しないでください。

注意事項

- 患者のポケット内や骨盤の周りがある物を取り除きます。
- 使用中は、圧迫障害がないか患者の皮膚を観察してください。
- 本製品は、単回使用です。

MRI下での使用

- MRI下での使用における非臨床試験を実施しています。本製品を装着した状態で3テスラ以下のMRIを使用することができます。
- 強磁性体のパーツを含むため、MRI検査の際は、患者にしっかりと固定してください。磁場では、位置の調整、取り外しは行わないでください
- 強磁性体のパーツがMRI検査の対象部位にあると、画質に影響を与える可能性があります。

注意

- 固定後に2回目のカチッという音がしても問題ありません。ベルクロによりバックルのかみ合わせに関係なく、本器を適切な力で固定します。

廃棄

- 再使用は、交差感染、製品機能の低下による怪我のリスクが生じます。
- 使用後は、バイオハザードの protocols に従って廃棄してください。

