

アウトースキッド



1. お問い合わせ先

ファーノ・ジャパン・インク

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル4階

TEL 03-5820-4649

Email resqinfo@ferno.com

https://www.ferno-jp.com

2. 保証

弊社規定により、ご購入日より1年間の保証をします。

3. スキルと訓練

- ・ 救助についての実務的知識を有すること。
- ・ 本書に記載されている手順を完全に理解していること。
- ・ 本器の使用に関する訓練を実施していること。
- ・ 所属組織が定めるプロトコルおよびガイドラインに従うこと。

4. 製品仕様

本器は、パーティカルストレッチャーブルー（商品コード：0305130021）に装着して使用します。

アウタースキッド本体


- ・ 寸法：約1950 x 820 x 1.5mm
- ・ 重量：約2.0kg
- ・ 材質：高密度ポリエチレン樹脂

付属品

- ・ ウェビング（900mm）2本

※ウェビングや細いロープ等が別途必要です。

5. 各部の名称

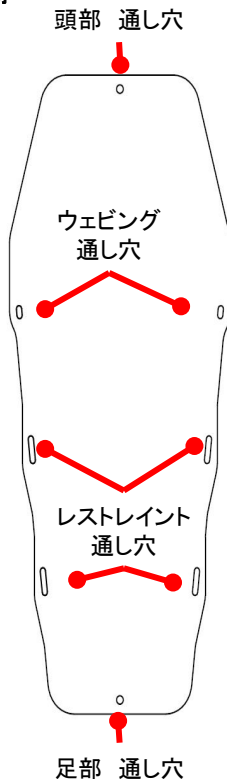

6. 使用上の注意

- ・ 本器を尖った岩、ガラス片などの鋭利な物の上で引き摺ることは避けてください。
- ・ 過度に曲げると破損の原因になりますのでご注意ください。
- ・ 本器を引きずる際、先端と地面の距離が短いと突起物や障害物に引っ掛かりますので、先端を約45度曲げ、調整してください（両端を同時に曲げる必要はありません。先頭側のみを曲げて下さい）。

7. 洗浄

- ・ 使用後は、中性洗剤で洗浄してください（希釈率等は、洗浄剤メーカーの取扱説明書に従ってください）。
- ・ 洗浄後は、水道水で完全に濯いでください。
- ・ 研磨剤、漂白剤、フェノール類、ヨウ素を含む洗浄剤は使用しないでください。
- ・ 直射日光や熱源を避け、風通しのよい場所で乾燥させてください。

8. 点検

毎使用時の点検項目：

- ・ 本体、ウェビング通し穴、レストレイント通し穴に亀裂、破損、過度の摩耗がないこと。
- ・ ウェビングの縫い目にほつれや破断がないこと。

点検の結果、損傷や過度の摩耗が見られた場合は、修理は行わず、使用を中止してください。


9. パーティカルストレッチャーへの取り付け方法



ウェビング通し穴(アウトースキッド)、リフティングバンドル(パーティカルストレッチャー)にウェビングを通し、結んで固定します。締めすぎに注意して下さい。



パーティカルストレッチャーのレストレイント(3番目、5番目)のバックルを解除後、レストレイント通し穴(アウトースキッド)に通します。レストレイントのオス、メスのバックルを接続します。

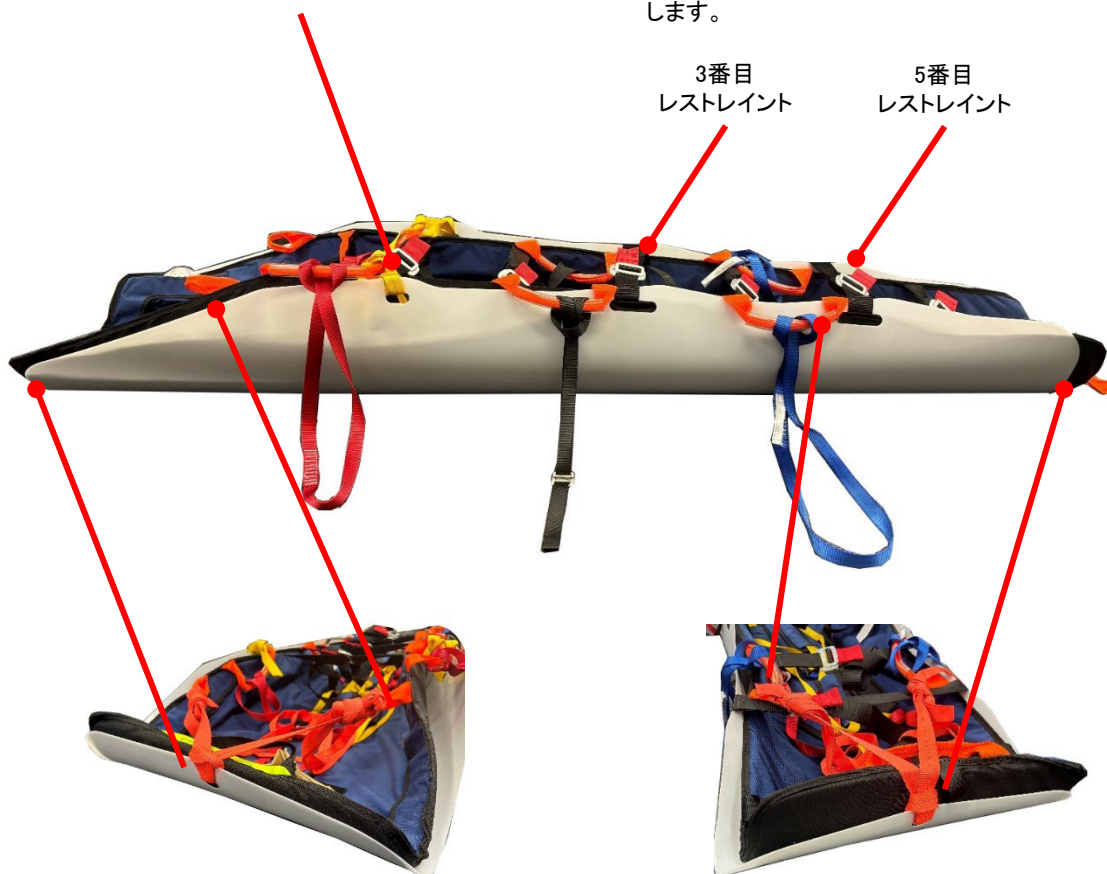

頭部側のウェビング通し穴(アウトースキッド)、垂直吊り用リフティングアイ(パーティカルストレッチャー)にウェビングを通し、結びます。

足部側のウェビング通し穴(アウトースキッド)、足部側リフティングハンドル(パーティカルストレッチャー)にウェビングを通し、結びます。

輸入元 ファーノ・ジャパン・インク
〒101-0032
東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル4F
TEL 03-5820-4849
www.ferno-jp.com

製品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

2024年7月作成