

類別 : 医療用品5 副木
一般的名称 : 伸縮式手足用副木
JMDNコード : 32302000
クラス分類 : クラスI 一般医療機器

エアースプリントキット


【警告】

- 1 実際に使用する前に、取扱方法を十分に習得して下さい。
- 2 使用法を習得した人以外は使用しないで下さい。
- 3 装着する際は、傷病者の安全を確保するために、2人以上で行って下さい。

【禁忌・禁止】

- 1 本体を膨らませる時は、空気入れ、コンプレッサー等は使用しないで下さい。

【形状・構造及び原理等】**

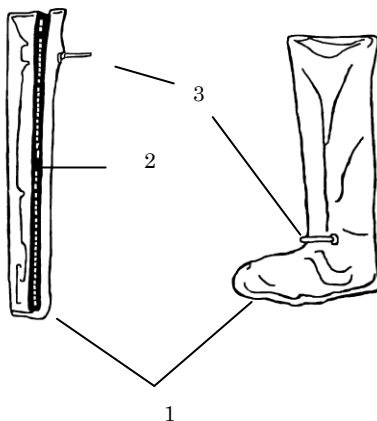

1 本体 2 ファスナー 3 バルブ

バルブから本体内部に空気を吹き込む事により、本体を膨らませて患部を固定する。

【使用目的又は効果】**

- 1 使用目的 負傷部位を固定するために使用します。
- 2 効能又は効果 負傷部位を固定する事で、二次障害を防止します。

【性能及び安全性に関する規格】**

- 1 水分、血液等が浸透しないので、常に清潔に保つ事ができます。

【使用方法等】**

- 1 本体のファスナーを開き、負傷部位に通し、ファスナーを閉めます。
- 2 バルブを引き出し、ストローを差し込み息を吹き込み膨らませます。
- 3 膨らんだら、ストローを抜き、バルブを押し込むと固定されます。
- 4 外す時は、バルブを引き出して中の空気を抜きます。
- 5 ファスナーを開き、本体を負傷部位から外します。

【使用上の注意】

- 1 使用方法を習得した人以外は使用しないで下さい。
- 2 装着は2人以上で行って下さい。
- 3 本体を装着する時は、傷病者の状態を絶えず確認して下さい。
- 4 装着中は、本体に異常が無い事を絶えず確認して下さい。
- 5 傷病者又は本体に異常が発見された時は、傷病者の安全を確保しながら適切な措置を講じて下さい。
- 6 本体は改造又は分解しないで下さい。

【保管方法及び有効期間】**

- 1 常温で保管して下さい。
- 2 化学薬品の保管場所、ガスを発生する場所には保管しないで下さい。
- 3 使用期限はありませんが、ファスナー、バルブに不具合がある場合、本体に亀裂が発生した場合は使用を中止して下さい。

【取扱上の注意】

- 1 本体に空気を吹き込む際は、必ず口で行って下さい。
- 2 本体に亀裂が発生した場合、ファスナー、バルブに不具合等がある場合には使用しないで下さい。

【保守・点検に係る事項】

- 1 使用後は、ぬるま湯を含ませた布で表面を拭いて下さい。
- 2 使用の都度、ファスナー、バルブ等に不具合が無い事、本体に亀裂が無い事を確認下さい。

【包装】

1セット(全セット)単位又は交換用単品単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】*

- 1 製造販売業者 ファーノ・ジャパン・インク
東京都千代田区岩本町1-9-5
FKビル 4階
Tel : 03-5820-4649
- 2 製造業者 Ferno Washington Inc.
ファーノ ワシントン社
アメリカ合衆国 オハイオ州

取扱説明書を必ず参照下さい。