

類別 : 医療用品5 副木
一般的名称 : 成形副木
JMDNコード : 35354000
クラス分類 : クラスI 一般医療機器

エクストリケーションカラー モデル452


【警告】

- 1 実際使用する前に、取扱方法を十分に習得して下さい。
- 2 使用法を習得した人意外は使用しないで下さい。
- 3 装着する際は、傷病者の安全を確保するために、2人以上で行って下さい。

【禁忌・禁止】

- 1 本体は繰り返し使用する事ができますが、亀裂が入った時は使用を中止して下さい。

【形状・構造及び原理等】**

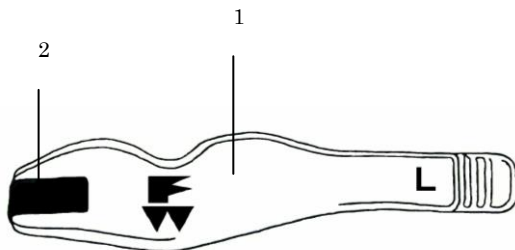

1 本体 2 固定用マジックテープ

傷病者の頸椎に本体を巻きつけ、マジックテープで固定します。

【使用目的又は効果】**

- 1 使用目的 頸部に損傷がある場合、損傷が疑われる場合に頸部を固定するために使用します。
- 2 効能又は効果 頸部を固定する事で、二次障害を防止します。

【性能及び安全性に関する規格】**

- 1 傷病者に合わせて、S、M、Lの各サイズを選択します。
- 2 水分、血液等が浸透しないので、衛生的に保つ事ができます。

【使用方法等】**

- 1 傷病者に合わせ、サイズを選択します。
- 2 傷病者の頸部に巻き付け、付属のマジックテープで固定します。

【使用上の注意】

- 1 使用方法を習得した人意外は使用しないで下さい。
- 2 装着は2人以上で行って下さい。
- 3 本体を装着する時は、傷病者の状態を絶えず確認して下さい。
- 4 装着中は、本体に異常が無い事を絶えず確認して下さい。
- 5 傷病者又は本体に異常が発見された時は、傷病者の安全を確保しながら適切な措置を講じて下さい。
- 6 本体は改造又は分解しないで下さい。
- 7 しばらく使用しなかった時は、使用前に点検して下さい。

【保管方法及び有効期間】**

- 1 常温で保管して下さい。
- 2 化学薬品の保管場所、ガスを発生する場所には保管しないで下さい。
- 3 使用期間は設定されていませんが、破損した時は使用を中止して下さい。

【取扱上の注意】

- 1 破損等が生じた場合には使用を中止し、適切な方法で廃棄して下さい。

【保守・点検に係る事項】**

- 1 使用後は、ぬるま湯を含ませた布で表面を拭いて下さい。
- 2 EOG滅菌（高温滅菌）はできません。

【包装】

1 枚単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】*

1 製造販売業者 ファーノ・ジャパン・インク
東京都千代田区岩本町1-9-5
FKビル 4階
Tel : 03-5820-4649

2 製造業者 Ferno Washington Inc.
ファーノ ワシントン社
アメリカ合衆国 オハイオ州

取扱説明書を必ず参照下さい。