

類別 : 医療用品5 副木
一般的名称 : 成形副木
JMDNコード : 35354000
クラス分類 : クラスI 一般医療機器

ファーノウィズロック


【警告】

- 1 実際使用する前に、取扱方法を十分に習得して下さい。
- 2 使用方法を習得した人以外は使用しないで下さい。
- 3 装着する際は、傷病者の安全を確保するために、2人以上で行って下さい。

【禁忌・禁止】

- * 本体は10回まで繰り返し使用出来ますが、亀裂が入った時や調節機構が破損した時は使用を中止して下さい。

【形状・構造及び原理等】**

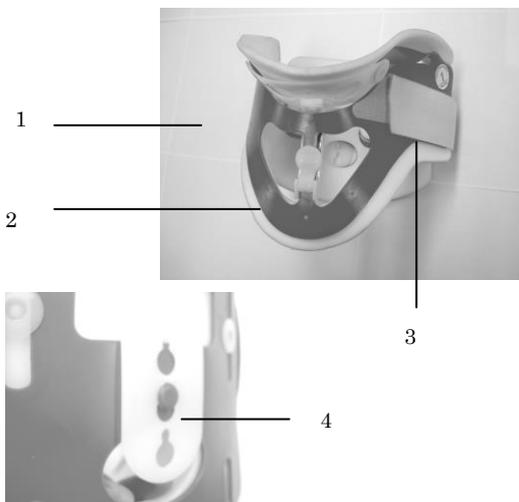

- | | |
|------------|--------------|
| 1 本体 | 3 固定用マジックテープ |
| 2 調節用カムロック | 4 後部調節機構 |

本体を頸椎に巻き、前後の調節機構でサイズを合わせて固定します。

【使用目的又は効果】**

- 1 使用目的 頸部に損傷がある場合、損傷が疑われる場合に頸部を固定するために使用します。
- 2 効能又は効果 頸部を固定する事で、二次障害を防止します。

【性能及び安全性に関する規格】**

調節機構が付いているため、傷病者に応じてサイズを調節できます。

【使用方法等】**

- 1 本体を傷病者の頸部に巻き付け、サイズを調節します。
- 2 サイズ、位置を決めたら、付属のマジックテープで固定します。
- 3 使用の都度、使用回数のシールを貼り替えて下さい。

【使用上の注意】

- 1 使用方法を習得した人以外は使用しないで下さい。
- 2 装着は2人以上で行って下さい。
- 3 本体を装着する時は、傷病者の状態を絶えず確認して下さい。
- 4 装着中は、本体に異常が無い事を絶えず確認して下さい。
- 5 傷病者又は本体に異常が発見された時は、傷病者の安全を確保しながら適切な措置を講じて下さい。
- 6 本体は改造又は分解しないで下さい。
- 7 しばらく使用しなかった時は、使用前に点検して下さい。
- 8 使用の都度、使用回数のシールを貼り替えて下さい。

【保管方法及び有効期間】**

- 1 常温で保管して下さい。
- 2 保管する際には、調節用カムロックを緩め、ロックレバーを下向きにして下さい。また、後部調節機構は、中央の位置で固定して下さい。
- 3 化学薬品の保管場所、ガスを発生する場所には保管しないで下さい。
- 4 使用期限は設定されていませんが、破損した時は使用を中止して下さい。

【取扱上の注意】

- 1 本体周囲のプラスチック部分、調節用カムロック、後部調節機構に亀裂、破損等が生じた場合には使用を中止し、適切な方法で廃棄して下さい。

【保守・点検に係る事項】

- 1 使用後は3%濃度の塩素水に15分程度浸してから、水道水で洗浄して下さい。調節用カムロック、後部調節機構は緩めた状態にして、十分乾燥させて下さい。
- 2 調節用カムロック、後部調節機構が破損していないか、周囲のプラスチックを固定しているリベットに不備が無いか確認して下さい。

【包装】

1セット3枚入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】*

1 製造販売業者 ファーノ・ジャパン・インク
東京都千代田区岩本町1-9-5
FKビル 4階
Tel: 03-5820-4649

2 製造業者 Ferno Washington Inc.
ファーノ ワシントン社
アメリカ合衆国 オハイオ州

取扱説明書を必ず参照下さい。