

類別 : 医療用品5 副木
一般的名称 : 成形副木
JMDNコード : 35354000
クラス分類 : クラスI 一般医療機器

ヘッドイモバイザー モデル445-SP


【警告】

- 1 実際に使用する前に、取扱方法を十分に習得して下さい。
- 2 使用法を習得した人以外は使用しないで下さい。
- 3 装着する際は、傷病者の安全を確保するために、2人以上で行って下さい。

【禁忌・禁止】

- 1 本体は繰り返し使用する事ができますが、亀裂が入った時、ストラップに不備がある時は、使用を中止して下さい。
- 2 本体はスクープストレッチャーと併用するものです。単体での使用はできません。

【形状・構造及び原理等】

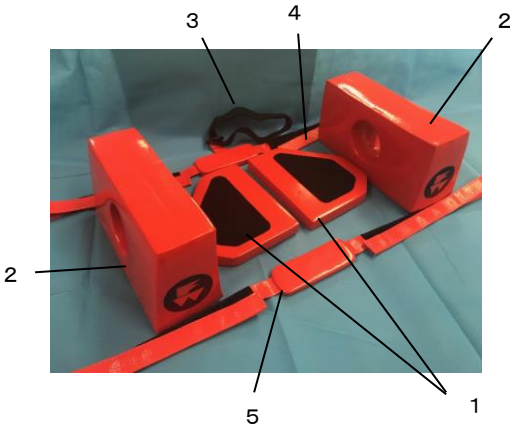

- | | |
|--------------|--------------|
| 1 ベースプレート | 4 額部固定用ストラップ |
| 2 ヘッドサポートパッド | 5 顎部固定用ストラップ |
| 3 頭部固定ストラップ | |

スクープストレッチャー左右のすくい羽の頭部にベースプレートを貼り付けます。ベースプレート中央に傷病者頭部が来るようにしてヘッドサポートパッドをベースプレートに貼り付け、頭部用、顎用ストラップで傷病者を固定します。

【使用目的又は効果】

- 1 使用目的 頭頸部外傷を負った傷病者に対し、負傷箇所を固定するために使用します。
- 2 効能又は効果 頭頸部を固定する事で二次性損傷を予防します。

【使用方法等】

- 1 ベースプレートをスクープストレッチャー等の担架に固定します。
- 2 傷病者の頭頸部がベースプレートの中央に来るように寝かせます。
- 3 頭部の両側にヘッドサポートパッドを置き、額、顎用ストラップで固定します。最後に頭部固定ストラップを固定します。

【使用上の注意】

- 1 使用方法を習得した人以外は使用しないで下さい。
- 2 装着は2人以上で行って下さい。
- 3 本体を装着する時は、傷病者の状態を絶えず観察して下さい。
- 4 装着中は、本体に異常が無い事を絶えず確認して下さい。
- 5 傷病者又は本体に異常が発見された時は、傷病者の安全を確保しながら適切な措置を講じて下さい。
- 6 本体は改造又は分解しないで下さい。
- 7 しばらく使用しなかった時は、使用前に点検して下さい。

【保管方法及び有効期限】

- 1 常温で保管して下さい。
- 2 化学薬品の保管場所、ガスが発生する場所には保管しないで下さい。
- 3 有効期限は設定されていませんが、破損した時は使用を中止して下さい。

【取扱上の注意】

- 1 破損等が生じた場合には使用を中止し、適切な方法で廃棄して下さい。

【保守・点検に係る事項】

- 1 使用後は、中性洗剤を含ませた布で表面を拭いて下さい。
- 2 EOG滅菌(高温滅菌)はできません。

【包装】

1セット単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- | | |
|----------|--|
| 1 製造販売業者 | ファーノ・ジャパン・インク 東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル 4階 Tel: 03-5820-4649 |
| 2 製造業者 | Ferno Washington Inc. ファーノ ワシントン社 アメリカ合衆国 オハイオ州 |

取扱説明書を必ず参照下さい。