

類別 : 医療用品5 副木
一般的名称 : 成形型副木
JMDNコード : 36204000
クラス分類 : クラスI 一般医療機器

スピードスプリント


【警告】

- 1 実際に使用する前に、取扱方法を十分に習得して下さい。
- 2 使用法を習得した人意外は使用しないで下さい。
- 3 装着する際は、傷病者の安全を確保するために、2人以上で行って下さい。

【禁忌・禁止】

- 1 本体は繰り返し使用できますが、本体に亀裂が入った時、フラップが破損した時は使用を中止して下さい。

【形状・構造及び原理等】

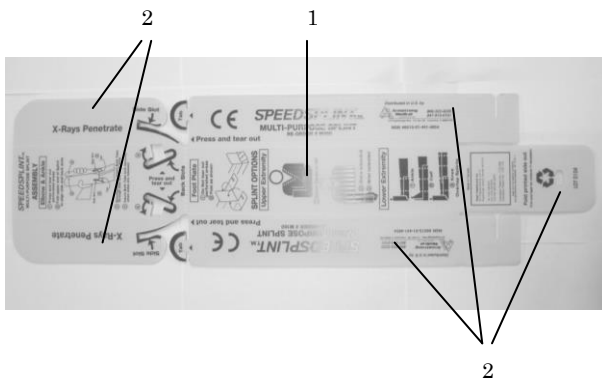

1 本体 2 フラップ

【使用目的又は効果】**

- 1 使用目的 負傷部位を固定するために使用します。
- 2 効能又は効果 負傷部位を固定する事で、二次障害を防止します。

【性能又は安全性に関する規格】**

- 1 水分や血液等が浸透しません。
- 2 装着したまま、レントゲン撮影が可能です。

【使用方法等】**

- 1 あらかじめ本体を負傷部位に合わせて折り曲げ、適切な形に整え、フラップを切れ目に差し込んで形を作ります。
- 2 足を固定する時は、必要に応じて2枚重ねて使用します。
- 3 負傷部位に合わせて、上からタオル、ハンカチ等で固定します。

【使用上の注意】

- 1 使用方法を習得した人意外は使用しないで下さい。
- 2 装着は2人以上で行って下さい。
- 3 本体を装着する時は、傷病者の状態を絶えず確認して下さい。
- 4 装着中は、本体に異常が無い事を絶えず確認して下さい。
- 5 傷病者又は本体に異常が発見された時は、傷病者の安全を確保しながら適切な措置を講じて下さい。
- 6 本体は改造又は分解しないで下さい。

【保管方法及び有効期間】**

- 1 常温で保管して下さい。
- 2 化学薬品の保管場所、ガスを発生する場所には保管しないで下さい。
- 3 使用期限はありませんが、本体に亀裂が入った時やフラップが破損した時は使用を中止して下さい。

【取扱上の注意】

- 1 繰り返しの使用で、本体に亀裂が入る等の劣化が見られる時は使用を中止し、適切な方法で廃棄して下さい。

【保守・点検に係る事項】*

- 1 使用後はアルコール等で表面を拭いて下さい。
- 2 使用の都度、本体に亀裂が無いか、フラップが破損していないか確認して下さい。

【包装】

1枚単位、1パック10枚入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】*

1 製造販売業者 ファーノ・ジャパン・インク
東京都千代田区岩本町1-9-5
FKビル 4階
Tel: 03-5820-4649

2 製造業者 Ferno Washington Inc.
ファーノ ワシントン社
アメリカ合衆国 オハイオ州

取扱説明書を必ず参照下さい。